

Frequently Asked Questions

Quale abbigliamento è più indicato ?

E' possibile indossarlo con ogni indumento, anche con i pantaloni corti, ancora meglio se si utilizzano dei leggings.

Come funziona ?

ExoBand immagazzina l'energia generata nella prima fase del ciclo del passo per restituirla all'utente nella seconda fase, accompagnando così la spinta dei flessori dell'anca e contribuendo ad un miglioramento funzionale del cammino. In particolare, va a facilitare il sollevamento della gamba e a ridurre lo strisciamento del piede.

Quali vantaggi offre ?

L'utilizzo regolare migliora la capacità di deambulazione dell'utilizzatore, permettendogli di camminare per distanze maggiori e con minor fatica.

È lavabile ?

Sì, con le dovute attenzioni i componenti in tessuto sono tutti lavabili a freddo.



La nostra visione

Moveo ha sede a Padova e radici profonde nell'Università di Harvard e nell'ecosistema di Boston.

La ricerca e lo sviluppo di Moveo sono interdisciplinari: ingegneria e biomeccanica si fondono insieme per rispondere a importanti esigenze non soddisfatte nel mercato dei dispositivi di assistenza.

I nostri prodotti sono progettati per migliorare lo stile di vita delle persone consentendo loro di camminare più lontano, più velocemente e più comodamente.

ExoBand è un dispositivo medico CE registrato in data 17/01/2020 presso il Ministero della Salute con identificativo di registrazione BD/RDM 1901901.

CND Y061215: ORTESI PER ANCA (INCLUDE LE ORTESI PER ABDUZIONE).

Dispositivo Medico Classe I Reg (UE) 2017/745 e s.m.i.



Viale dell' Industria, 19, Padova (PD) 35129
T. +39 391 459 0627
M. info@moveowalks.com
www.moveowalks.com
P.IVA IT 05236760285
R.E.A. PD-453620



ExoBand: Ogni giorno, un passo in più.



ExoBaby

Il semplice gesto del camminare è quanto mai prezioso per la salute della persona, indipendentemente dall'età e dalle condizioni fisiche. È scientificamente dimostrato che camminare meglio, in modo funzionale e con una discreta autonomia, porta nel tempo a benefici concreti e misurabili non solo a livello fisico, ma anche mentale ed emotivo.

Cos'è ?

E' un dispositivo costituito da una cintura e due cosciali. Questi tre elementi indipendenti sono collegati tra loro da un meccanismo che immagazzina l'energia generata nella prima fase del ciclo del passo per restituirla all'utente nella seconda fase, aiutando così la spinta dei flessori d'anca e portando, di conseguenza, a un miglioramento funzionale del cammino.

A cosa serve ?

Aiuta persone con rallentamenti motori a camminare in modo più funzionale e per maggiori distanze.

Questo si traduce in:

- maggior velocità del cammino,
- minor scivolamento del piede,
- aumentata stabilità del tronco,
- diminuzione del rischio di cadute,
 - maggiore equilibrio,
 - maggiore distanza percorsa,
- miglior pendolarismo degli arti superiori.

Innovazione nei materiali



Cordura rosso



Airshell




Cordura nero



Loop fabric



Cordura plastificato

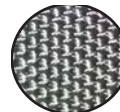

Banda elastica



Tabella taglie *Indicative

<i>Età</i>	<i>Circonf. Cintura</i>	<i>Circonf. Cosciali</i>
<i>5 - 10 anni</i>	<i>cm 60 - cm 75</i>	<i>cm 25 - cm 30</i>

Comodo

Realizzato in tessuti tecnici, si adatta alla tua struttura corporea per aiutarti a camminare meglio, offrendoti un'esperienza d'uso confortevole.

Regolabile

Grazie a semplici e veloci regolazioni, puoi personalizzarlo in base alla tua specifica deambulazione, per un diverso livello di assistenza per ogni gamba.

Leggero

Con un peso totale (cintura e cosciali) di appena 295 g, puoi indossarlo anche per lungo tempo senza affaticarti.